


## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЛЯ БЕСПРОВОДНЫХ МОДЕЛЕЙ


### ОТКАЗ ЭЛЕКТРОДА

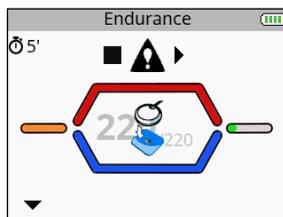

На пульте дистанционного управления отображается символ электрода и отключенного модуля, а также мигает стрелка, указывающая на соответствующий канал (в данном случае канал 1).

- Убедитесь, что электроды правильно подключены к модулю.
- Если электроды старые, изношенные и/или нарушен контакт — попробуйте заменить электроды.

### МОДУЛЬ ВНЕ ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ

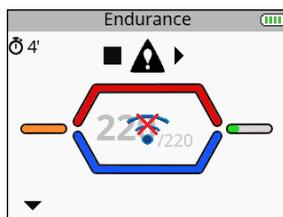

На пульте дистанционного управления отображается символ модуля вне зоны действия, а также мигает стрелка, указывающая на соответствующий канал (в данном случае канал 1).

- Убедитесь в том, что модуль и пульт дистанционного управления находятся на расстоянии менее 2 метров друг от друга.
- Между модулем и пультом дистанционного управления не должно быть препятствий, которые могут отражать сигнал.
- Убедитесь в том, что сигнал достигает пульта дистанционного управления.

## ПРОБЛЕМА С СИНХРОНИЗАЦИЕЙ



Если процедура синхронизации была прервана или не может быть успешно выполнена по каким-либо причинам (отсоединен пульт дистанционного управления, отсутствует питание и т. д.), на пульте дистанционного управления отображается следующий экран.

- Подключите повторно пульт дистанционного управления к компьютеру и перезапустите процедуру синхронизации.

## СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ МОДУЛЯ

Индикатор попеременно загорается зеленым и красным цветом: модуль находится вне зоны действия или не распознается пультом дистанционного управления.

- Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления включен.
- Убедитесь в том, что модуль и пульт дистанционного управления находятся на расстоянии менее 2 метров друг от друга.


Индикатор горит красным цветом.

- Убедитесь в том, что модуль заряжен.
- Попробуйте перезапустить пульт дистанционного управления и модули.
- Если индикатор продолжает гореть красным цветом, обратитесь в службу поддержки компании Comrex.

Индикатор не горит.

- Убедитесь в том, что модуль заряжен.
- Если индикатор не загорается, обратитесь в службу поддержки компании Comrex.


## МОДУЛЬ РАЗРЯЖЕН

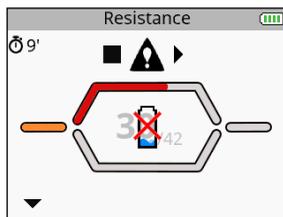

Во время стимуляции модуль может разрядиться. В этом случае отображается символ разряженной батареи, а также мигает стрелка, указывающая на соответствующий канал (в данном случае канал 1).

- Остановите стимуляцию и перезарядите модуль.
- Оставьте разряженный модуль и продолжайте сеанс стимуляции без него.

## МОДУЛЬ НЕ СВЯЗЫВАЕТСЯ С ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

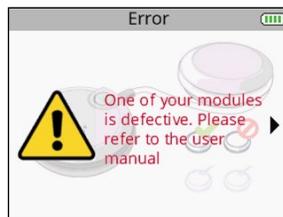

Если во время первого использования пульта дистанционного управления не удается связаться со всеми модулями, появляется сообщение об ошибке.

- Убедитесь в том, что модуль заряжен, и повторите процедуру связывания.
- Если сообщение отображается снова, обратитесь в службу поддержки компании Comrex.

## СТИМУЛЯЦИЯ НЕ ДАЕТ ОБЫЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ

- Убедитесь в правильности настроек и расположения электродов.
- Чуть сдвиньте электроды.

## СТИМУЛЯЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ ДИСКОМФОРТ

- Электроды потеряли свою клейкость и больше не обеспечивают достаточный контакт с кожей.
- Электроды изношены и должны быть заменены.
- Чуть сдвиньте электроды.

**ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ**

- Проверьте заряд пульта дистанционного управления и модулей.
- Попробуйте перезапустить пульт дистанционного управления и модули.
- Если прибор не заработает после этого, обратитесь в службу поддержки компании Comrex.